



SitnStand : COUSSIN RELEVEUR GONFLABLE SUR BATTERIE

Accessibilité
Aides techniques aux déplacements

Pour une plus grande indépendance en tous lieux

Présentation

Le coussin releveur SitnStand permet à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever seul, en toute sécurité et en douceur.

Son utilisation est très simple, grâce à un boîtier de commande et un petit compresseur sur batterie qui assure le gonflage de l'assise, ajustable selon vos besoins.

SitnStand
Siège élévateur portable et intelligent



Les atouts du SitnStand

Pour vous asseoir, installez-vous confortablement au centre du coussin et pressez la flèche ↓. L'assise va se dégonfler lentement.


Pour vous relever, détachez votre dos du dossier, placez vos pieds près du siège, écartez les et appuyez sur la flèche ↑ pour lancer le gonflage de l'assise. Quand vous estimez avoir atteint la position désirée, vous pouvez vous redresser.



Boîtier de commande



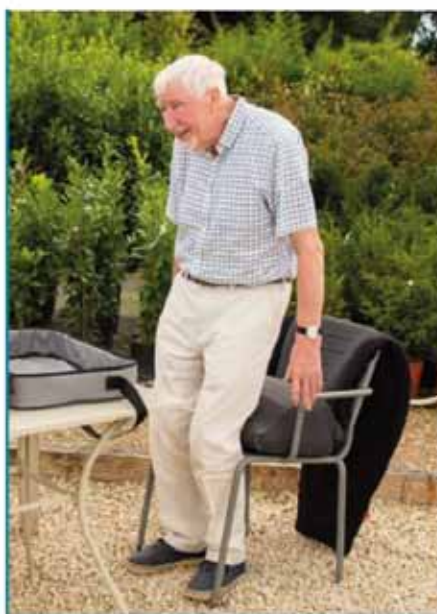

Mobile et sur batterie, le coussin releveur gonflable SitNStand se pose sur la majorité des chaises, fauteuils, salons de jardin etc. Vous pouvez l'utiliser partout, aussi bien chez vous, que lors de vos déplacements.



RECOMMANDATIONS :

- Ce dispositif convient aux personnes pouvant se déplacer seules.
- Lorsque vous êtes assis dans le fauteuil vos pieds doivent toucher facilement le sol.
- Veuillez à placer le SitNStand au plus profond du fauteuil.
- Pour un meilleur confort, vous pouvez placer un oreiller entre le dossier de votre fauteuil et le dossier du coussin releveur.



Le coussin releveur SitNStand, de nombreux avantages en complément de l'utilisation d'un fauteuil releveur standard !	Fauteuil releveur Standard 	Coussin releveur SitNStand 
Peut se transporter à l'extérieur ?	NON	OUI
S'adapte à tous les types de fauteuil ?	NON	OUI
Fonctionne à l'aide d'une batterie ?	NON	OUI
S'agit-il d'un dispositif médical ?	NON	OUI
Se nettoie facilement ?	OUI	OUI
Hauteur de levage ajustable ?	OUI	OUI

